



MASCHERINE

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO:

Mascherina facciale igienica ad uso generico, individuale, idrorepellente, traspirante, con elastici, RIUTILIZZABILE.

CARATTERISTICHE:

Ottima vestibilità - Ottima respirabilità - Buona filtrazione - Buona resistenza alla trazione sia longitudinalmente che trasversalmente - Idrorepellente - prodotto NON STERILE. Riutilizzabile dopo corrette procedure di lavaggio e disinfezione.

Lavare con acqua corrente fredda. Per la disinfezione usare un cloroderivato (es. Ipoclorito a bassa concentrazione). Si consiglia il lavaggio e disinfezione prima di ogni utilizzo.

DESTINAZIONE D'USO:

La mascherina non è provvista di marchio CE e essere utilizzata in conformità alla disposizioni dell'art. 16 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 e della Circolare n. DGDMF/003572/P/18/03/2020 emanata dal Ministero della Salute.

E' una mascherina facciale igienica ad uso generico, non svolge in alcun modo funzioni di protezione delle vie respiratorie per chi la indossa, ma serve ad evitare che la persona "contamini" l'ambiente circostante.

E' fondamentale adottare tutte le misure anti-contagio attualmente in vigore. A tale riguardo si informa che, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 e della Circolare n. DGDMF/003572/P/18/03/2020 emanata dal Ministero della Salute, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 è consentito a tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, a cui è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza Covid-19, di utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine filtranti che per la loro destinazione non si configurano né come DM, né come DPI.

Non possono essere utilizzate durante il servizio degli operatori sanitari né dagli altri lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza.

Non è un Dispositivo di Protezione Individuale ai sensi del Regolamento 2016/245 ed el D.Lgs 81/8 e s.m.l.

Non è un Dispositivo Medico ai sensi del D. Lgs n. 43 del 24/02/1997.

Non è una maschera facciale ad uso medico come definita dalla UNI EN 14683:2019.

La mascherina non garantisce in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi lo indossa. [Le mascherine igieniche (protezione naso bocca) non offrono protezione efficace contro i patogeni] E' fondamentale adottare tutte le misure anti contagio attualmente in vigore, ivi inclusa la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non utilizzare questo prodotto per uso improprio. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO/UTILIZZO:

La mascherina grazie alla sua forma si adatterà al viso. Fissarla dietro la testa, sistemando dietro alle orecchie i comodi elastici auricolari. Regolarne la forma, posizionando la maschera sopra il naso e la bocca.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE DEL DISPOSITIVO:

Conservare a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto.

PRECAUZIONI D'UTILIZZO:

Non utilizzare in caso di evidenti difetti quali materiali danneggiato, bucato o scucito. Al fine di prevenire contaminazioni, è essenziale che:

- la mascherina sia indossata movimentandola tramite gli appositi elastici;
- le mani vengano disinfettate (disinfezione completa delle mani) dopo la rimozione della mascherina;
- la mascherina copra naso e bocca;
- la mascherina sia lavata/disinfettata con le mani pulite;
- la mascherina usata sia eliminata quando non è più necessaria/utilizzabile.

CONTROINDICAZIONI E INTERAZIONI:

Non ci sono particolari controindicazioni o interazioni nell'utilizzo di questo articolo se vengono seguite le istruzioni.

MATERIALE:

Tessuto non tessuto.

Composizione chimica: 100% polipropilene

Dimensioni: 20x10 cm

MODALITA' DI TRASPORTO E SMALTIMENTO:
Non ci sono particolari osservanze cui attenersi nel trasporto; lo smaltimento va effettuato nei contenitori dei rifiuti solidi se la mascherina non risulta contaminata con sostanze.
In caso di reale contaminazione, la mascherina dovrà essere smaltita negli appositi contenitori dei rifiuti biologici o chimici.

CONFEZIONE E IMBALLO:
Confezione in dispenser da 50 pezzi riportanti il lotto di fabbricazione.

ATTENZIONE:
Leggere e conservare queste informazioni e istruzioni per futura referenza.



**Prodotto da: Peraria Srl - Via Barberis 7
12020 Vottignasco (CN) - P.IVA 02503360048**

**Commercializzato da: Ambrosino snc
Via Monsola 7A - 12020 Villafalletto (CN)
Tel. 0171/938150**